

# 取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

製造番号

**T O R**<sup>®</sup>  
Thorough, Originality, Reliance

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器  
リクライニングマッサージチェア

品番 **AX-HQT232**



## 使用目的または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

## 目次

△ 安全上のご注意	1～4	📦 保管について	23
🔍 梱包内容と各部の名称	5～7	🔧 故障かなと思ったら	23
👤 使いかた	8～21	⚙️ 仕様	24
🧼 お手入れ	22	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙

このたびはAX-HQT232をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。





なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

**ATEX**

# ⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

<b>警告表示の意味</b>	表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>禁止を促す記号</b>	
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
 <b>強制を促す記号</b>	

## ⚠ 警告

### 症状について



**次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。**

- ・医師からマッサージを禁じられている人  
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む。) など

**自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。**  
けがの原因になります。



**次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。**

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・背骨 (脊椎) に異常のある人や曲がっている人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ・体温38℃以上 (有熱期) の人  
例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・その他、医療機関で治療中の人
- ・けんしょう (腱鞘) 炎の人

**使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。**  
健康を害するおそれがあります。

**使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。**  
事故や健康を害するおそれがあります。

## ご使用について



幼児やお子様を使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。

思わぬ事故の原因になります。

使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。

カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。

マッサージ部周辺にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

頭、顔、のど、胸部には使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

首周辺をマッサージする時は、マッサージ部の動きに注意してください。また、首の前方はマッサージしないでください。

事故や体調不良の原因になります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。

事故・感電・低温やけどのおそれがあります。

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。

事故やけがのおそれがあります。

もみ玉面に勢いよく身体を当てないでください。

けがの原因になります。

動作中、マッサージ部に手や指を差し込まないでください。

けがの原因になります。

マッサージ器に身体を強く当てすぎないでください。

負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。



カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売元または製造販売元に連絡してください。

事故やけがの原因になります。



リクライニング機能のあるシートは、リクライニングを戻す際はゆっくりとレバーを引いて少しずつ戻してください。

事故やけが、故障の原因になります。



# 安全上のご注意

## 警告


### 電源について

-  電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底でコードを踏んだ状態のまま使用しないでください。  
感電・ショート・火災の原因になります。
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・火災の原因になります。
- ぬれた手で本体や電源コードには触れないでください。  
感電・事故の原因になります。
-  お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電やけがの原因になります。
- 電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。  
火災やけがの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 停電の時はすぐに電源を切ってください。  
感電やけがの原因になります。

### 異常(故障)について


-  故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。  
事故やけがの原因になります。
-  緊急時や動作中に異常を感じたら、直ちにACアダプタープラグを本体から抜いてください。  
事故やけがの原因になります。

### その他

-  改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。  
火災・感電・けがの原因になります。

## 注意

### ご使用について

-  浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。  
感電や故障の原因になります。
- この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。  
故障や事故の原因になります。



本体に強い衝撃や荷重を与えないでください。

故障や事故の原因になります。

もみ玉に故意に力を加えて無理に止めないでください。

けがや事故の原因になります。

投げたり、落したりしないでください。

破損や故障の原因になります。

もみ玉を下にして動作させないでください。

破損の原因になります。

低温やけどをおこすおそれがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ・熱すぎると感じた場合の使用
- ・こたつの中や、ストーブなど暖房器具の近くでの使用

#### 「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。



使い始めは5分程度をめどに弱い刺激でご使用ください。

初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

1回の使用は15分以内とし、1日の使用は1日2回、30分以内を目処にご使用ください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

マッサージの刺激が強すぎると感じた時は、弱く当ててください。

強い刺激のまま使用を続けると、健康を害するおそれがあります。

同一箇所への連続使用は避けてください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

本品に大きな荷重がかかるような使い方をする、保護装置が作動し、動作が止まる場合があります。

停止した場合は、しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作させてください。

使用後は、背もたれ部を完全に起こしてください。

けがや事故の原因になります。

## 組み立て時のご注意




- 本説明書をよく見て、あらかじめ内容を把握してから組み立ててください。
- 組み立ては大人の方が説明書に従って組み立ててください。
- 手をけがしないよう必要に応じて手袋をしてください。
- 組み立て作業はフローリング(木製床)などにキズが付かないように、商品を梱包しているダンボールケースの上で行ってください。
- 組み立ての際は、近くにお子様やペットがいないか十分に注意してください。
- 組み立ての際は、手や指をはさまないように十分に注意してください。
- 必ず組み立てが正しくできていることを確認してからご使用ください。組み立てが不十分あるいは間違っているとけがや事故、故障の原因になります。
- 定期的にネジやナットがゆるんでいないかを確認してください。ネジやナットがない(不十分している)状態では使用しないでください。けがや事故の原因となります。

# 梱包内容と各部の名称


## 梱包内容(部品一覧)

組み立て前に部品がすべて揃っているか、確認してください。

### 本体

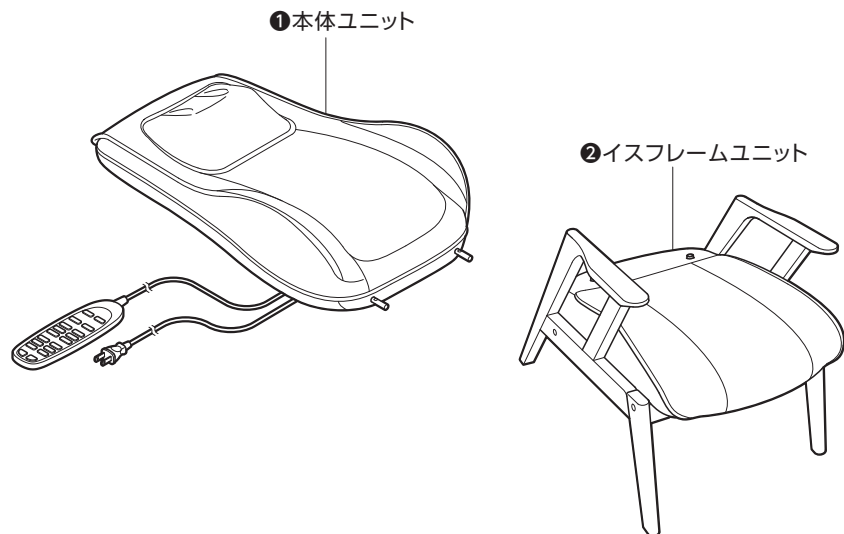

### 付属品

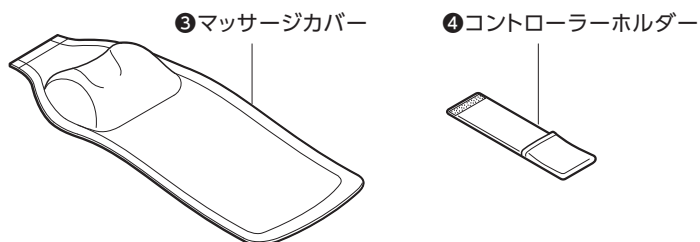

### 組立部品



⑤ 組み立てネジ  
(M6×12 mm)×2




⑥ 六角レンチ×1



⑦ フェルトシート×4


## 各部の名称

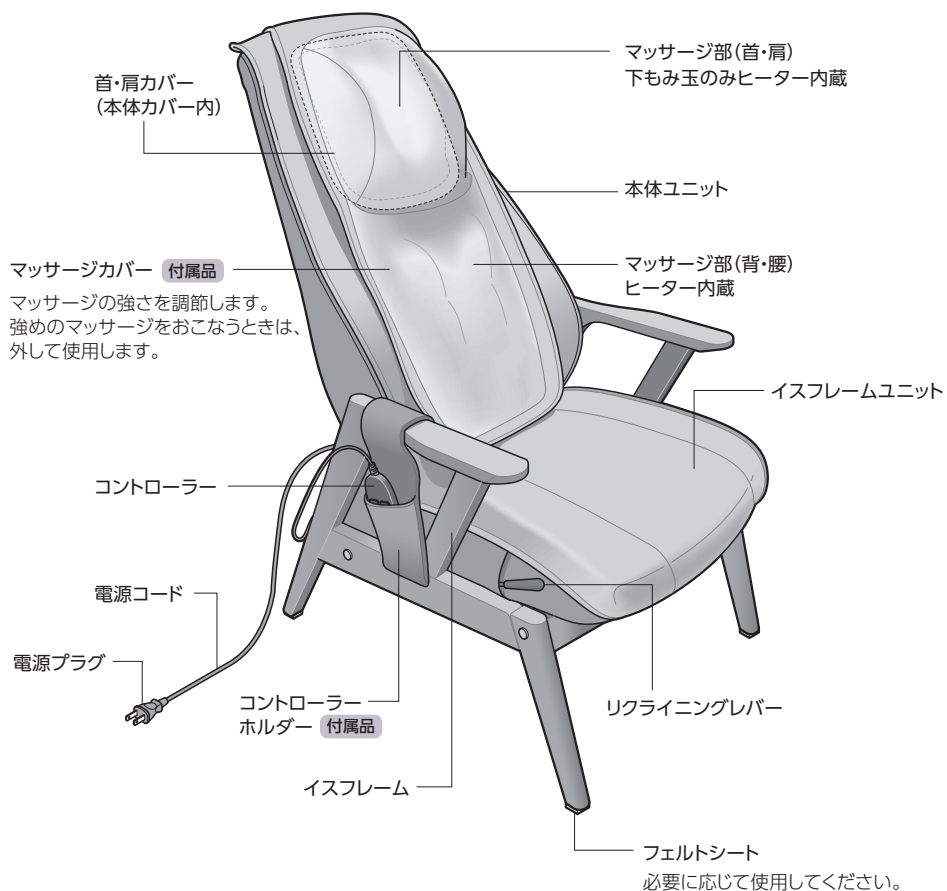

# 🔍 梱包内容と各部の名称


## コントローラー

※ボタン操作の詳細は「使い方」ページで必ずご確認ください。

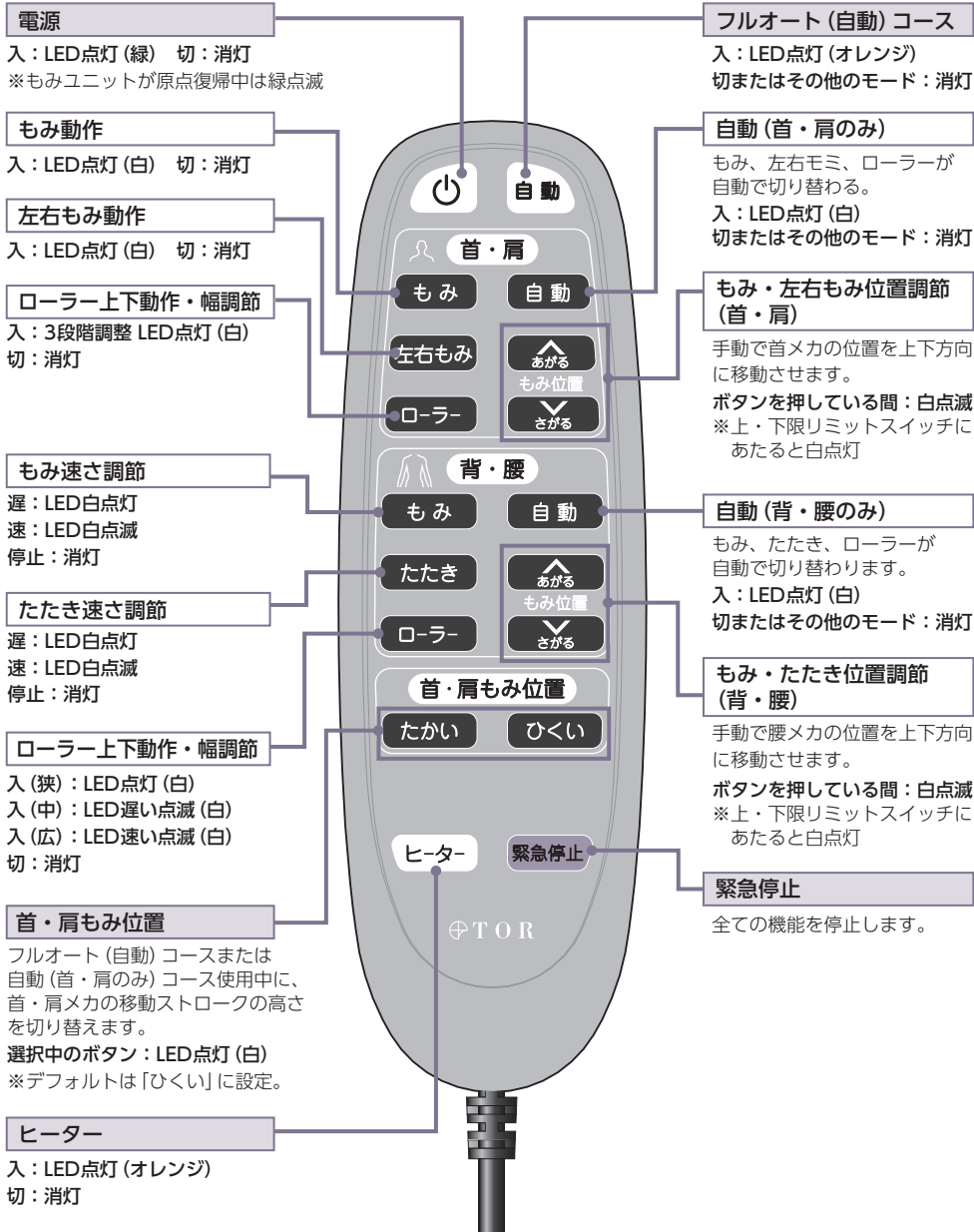



## 使用前の準備(組み立て)

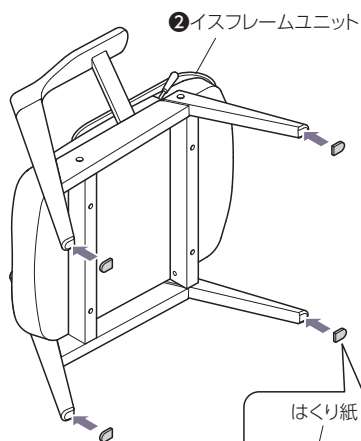

### 1 フェルトシートを貼り付ける

②イスフレームユニットで床面を傷けるおそれがある場合は、⑦フェルトシートを貼り付けてください。

※じゅうたんやカーペット等の傷付くおそれのない床で使用するときは、フェルトシートの貼り付けは不要です。


⑦フェルトシートからはくり紙をはがし、②イスフレームユニットの足裏に貼り付けます。

#### POINT

- フェルトシートは底面に合わせて貼ってください。ずれていると、はがれることがあります。
- フェルトシートを貼らない場合、足裏の塗料が床に付く場合がありますのでご注意ください。


### 2 本体ユニットとイスフレームユニットのジョイント部を合わせる

①本体ユニットを傾け、②イスフレームユニット後方からジョイント部を合わせます。

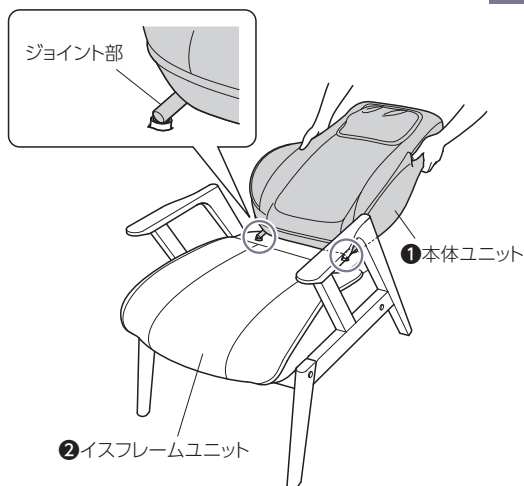

## 3 本体ユニットを差し込む

①本体ユニット持ち上げるようにしてジョイント部に差し込みます。


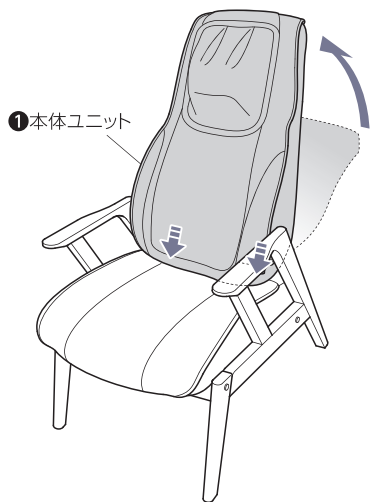


## 4 本体ユニットとイスフレームユニットを固定する

ジョイント部後方より⑤組み立てネジで固定します。


### POINT

●ケーブルの取り回しを確認してください。

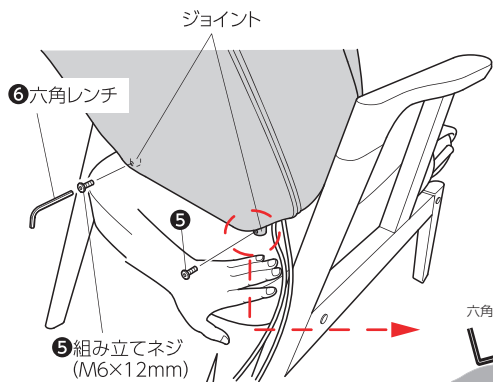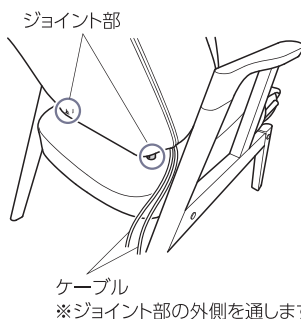


ネジ取付け付近のクッションを押さえながら、ネジを六角レンチで締め付けてください。

※半年に一度、ネジの増す締めをしてください。

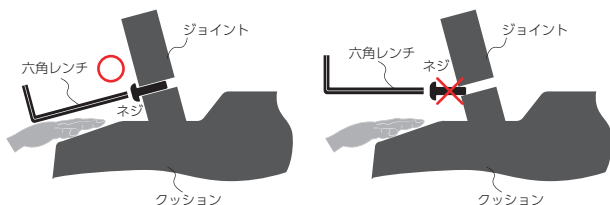


- ・ネジを締める際は上の図の○印のようにネジが穴に真直ぐ入るように注意してください。
- ・六角レンチがネジに真直ぐ入るように、手でクッションを押してください。
- ・この状態でネジを軽く締め付けて、ネジ山が合っていることを確認してから締め込んで下さい。
- ・×印のネジのように穴に斜めに入れた状態で締めるとネジ山を潰すことになり、締まらなくなりますので注意してください。

## 5 コントローラーホルダーを取り付ける

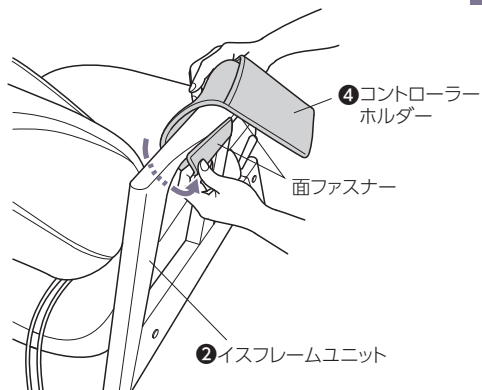

④コントローラーホルダーを②イスフレームユニットの肘置き部に巻き付け、面ファスナーで固定します。

## 6 マッサージカバーを取り付ける

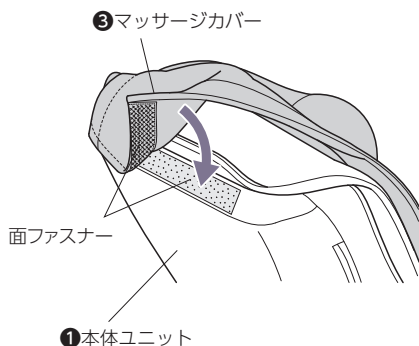

①本体ユニットの面ファスナー部に  
③マッサージカバーの面ファスナー部を貼り付けて固定します。

※マッサージの強さを調節します。


強めのマッサージをおこなうときは、外して使用するか背面にめくって使用してください。

## ⚠️ **ご注意** 使用前の注意事項

- 使用前にマッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前にスイッチや、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。
- しばらく使用しなかった場合、ネジのゆるみなどがなく必ず確認してから使用してください。
- 商品に大きな荷重がかかるような使い方をすると、保護装置が作動し動作が止まる場合があります。停止した場合は、しばらく本体を休ませて（1時間程度）から再度動作させてください。



## 電源に接続する

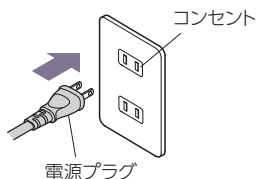


## 電源プラグを コンセントに差し込む

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

### 《保護装置について》

- 本製品は連続で使用された場合や、大きな負荷がかかった場合、保護装置が作動し、モーターが停止することがあります。停止した場合は、しばらく本体を休ませて（1時間程度）から、再度動作させてください。

## 主な機能

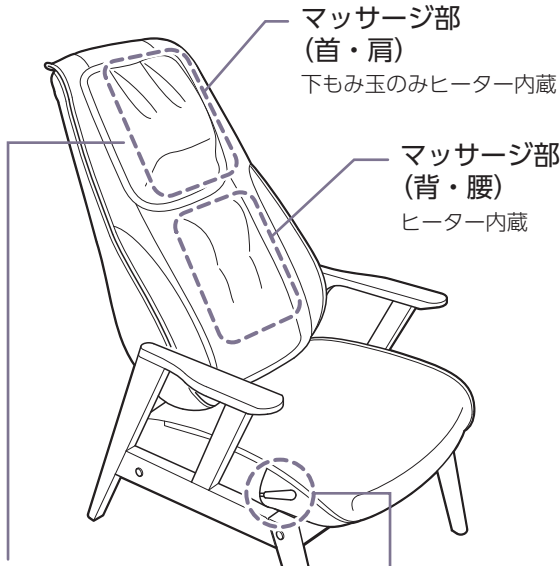

### 首・肩カバー

取り外してお洗濯ができます。  
(P.22参照)  
被せて使用すると、もみ玉のあたり  
具合がソフトになります。  
お好みでご使用ください。

### リクライニングレバー

レバーを引ながらもたれることで背もたれの角度が調整できます。お好みの角度でレバーを離して固定します。  
レバーを引ながら身体を起こすと元の位置(約115°の角度)に戻ります。  
自動で戻らない場合は手をそえて戻してください。

## フルオートコース

「首・肩」と「背・腰」を  
おまかせで同時に使用する

▶ P.13

## お好みモード

「首・肩」と「背・腰」を  
お好みの設定で使用する

「首・肩」▶ P.15


「背・腰」▶ P.19

### 背もたれリクライニング

約115°～約130°の間で  
無段階に調整ができます。



## フルオート(自動)コースでマッサージする

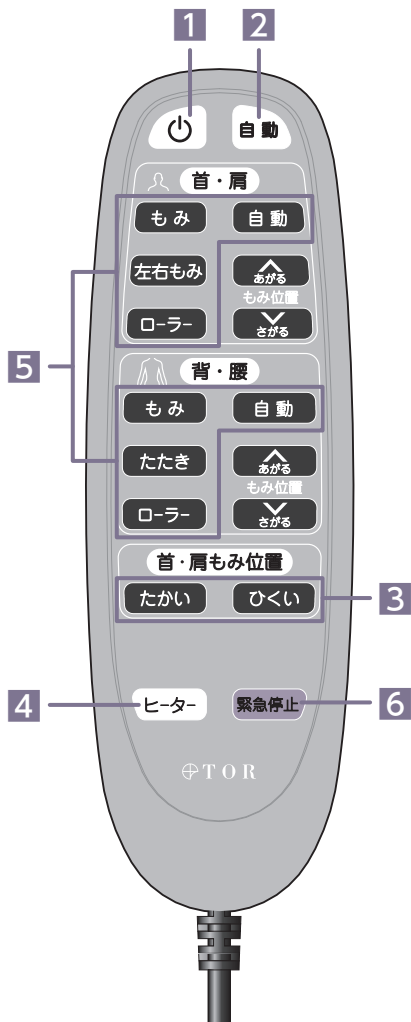

### 1 「電源」ボタン を押す

電源が入り、ランプが緑色に点灯します。  
※もう一度押すと、ランプが点滅しもみ玉が初期位置に戻った後、電源が切れます。

#### ●電源ボタンのランプが点滅


マッサージのメカが初期位置に戻るために自動的に動きます。

### 2 「自動」ボタンを押す

フルオート(自動)コースで「首・肩」と「背・腰」の両方でマッサージを開始します。  
※もう一度押すと、初期位置に戻り停止します。

### 3 首・肩もみ位置を調節する

「たかい」「ひくい」のボタンを押して調節します。  
選択されたボタンのランプが白色に点灯します。  
※開始時の初期位置は「ひくい」に設定されています。「たかい」を選択すると、「ひくい」の位置より約7cm高い位置から動作します。

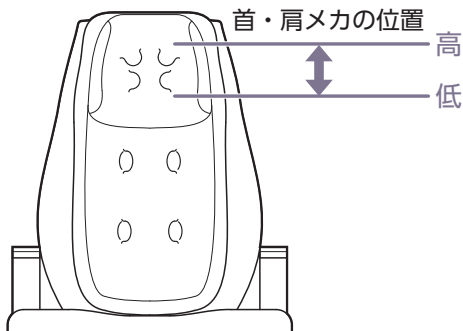

## 4 ヒーターを使う

使用中にヒーターをオン/オフできます。

※開始時は「オフ」に設定されています。

## 5 お好みモードへ切り替え

フルオート (自動) コース中に「首・肩」「背・腰」のモードボタンを押すと切り替えができます。

※お好みモード (首・肩) の詳細はP.15 ~ 18参照

お好みモード (背・腰) の詳細はP.19 ~ 21参照

### ●お好みモード中に「フルオート (自動)」ボタンを押すと


マッサージのメカが初期位置に戻ってから、フルオート (自動) コースで動作を開始します。

## 6 終了する

終了のしかたは3通りあります。

- ①「自動」ボタンをもう一度押す、もしくは約15分でタイマーが働き、初期位置に戻った後、自動停止します。
- ②「電源」ボタンを押すともみ玉が初期位置に戻った後、停止して、電源もオフします。
- ③「緊急停止」ボタンを押すと、直ちに全ての動作が停止します。

## お好みモード(首・肩)でマッサージする

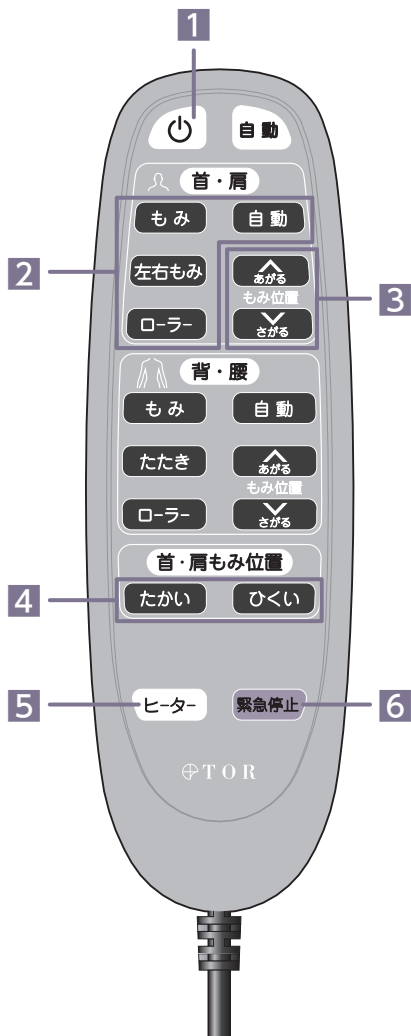

### 1 「電源」ボタン を押す

電源が入り、ランプが緑色に点灯します。  
※もう一度押すと、ランプが点滅しもみ玉が初期位置に戻った後、電源が切れます。

#### ●電源ボタンのランプが点滅

マッサージのメカが初期位置に戻るために自動的に動きます。

### 2 4つのモードのボタンを選んで押す

好みのモードのボタンを押すとマッサージを開始します。

※もみ・たたきは、もう一度同じボタンを押すと動作を停止します。

#### もみ



「もみ」ボタンを押すと、「もみ」ボタンが点灯し、動作を開始します。

もみ玉左・右が矢印の方向に回転動作します。

#### 左右もみ




「左右もみ」ボタンを押すと、「左右もみ」ボタンが点灯し、動作を開始します。

もみ玉左・右が少しタイミングをズラした状態で矢印の方向に回転動作します。



## ローラー

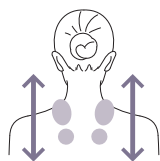

ローラー幅は、3段階に幅調整もしくは、停止が選べます。  
「ローラー」ボタンを押すと、「ローラー」ボタンが点灯し、動作を開始します。  
ストレッチ幅を選んで上下移動の動作をします。  
(上限位置では約1.5秒静止して再動作します。)


## 自動



「自動」ボタンを押すと、「自動」ボタンが点灯し、動作を開始します。  
「もみ」、「左右もみ」、「ローラー」モードがランダムに動作します。  
開始時の初期位置は「ひくい」に設定されています。  
「たかい」を選択すると、「ひくい」の位置より約7cm高い位置から動作します。

### 3 首・肩の「もみ」と「左右もみ」位置を調節する


「あがる」「さがる」のボタンを押して調整します。  
「あがる」「さがる」ボタンのランプが白色に点滅します。  
選択したボタンのランプが点灯になるまで移動できます。  
※自動モードでは調節できません。

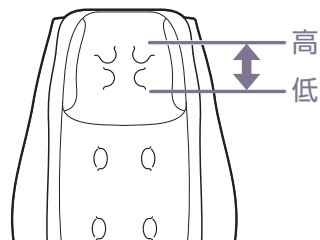

#### ● 背・腰と同時に使用できます

「首・肩」モードを使用中に「背・腰」モードも設定できます。  
※タイマーは先に開始したモードの時間で同時に終了します。

お好みモード(首・肩)でマッサージする(つづき)

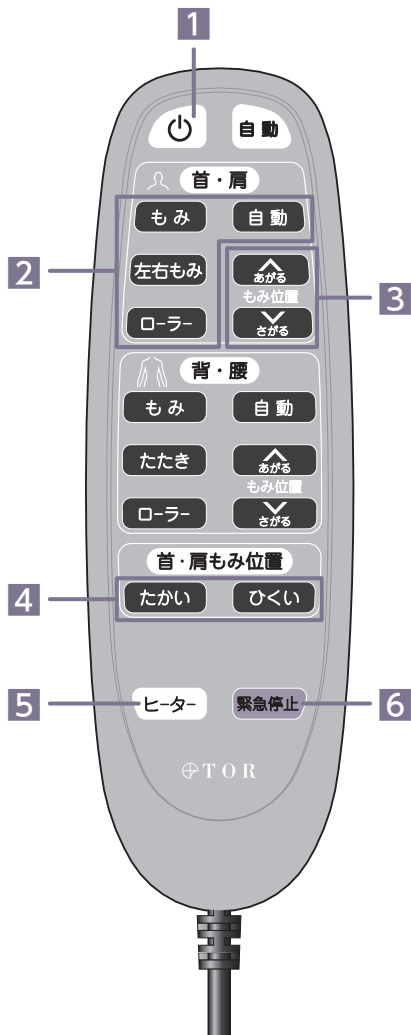


4 「自動」ボタンの  
首・肩もみ位置を調節する

「たかい」「ひくい」のボタンを押して調節します。

選択されたボタンのランプが白色に点灯します。

※開始時の初期位置は「ひくい」に設定されています。「たかい」を選択すると、「ひくい」の位置より約7cm高い位置から動作します。

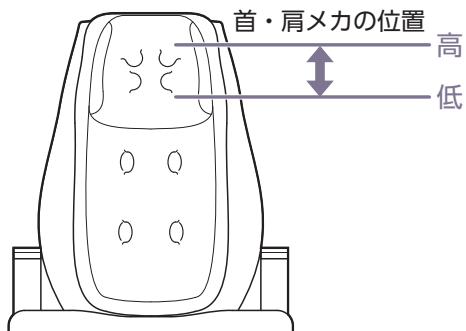

## 5 ヒーターを使う

もみ玉動作中にヒーターをオン/オフできます。


※開始時は「オフ」に設定されています。

## 6 終了する

終了のしかたは3通りあります。

- ①各モードのボタンを押してから約15分でタイマーが働き、初期位置に戻った後、自動停止します。
- ②「電源」ボタンを押すともみ玉が初期位置に戻った後、停止して、電源もオフします。
- ③「緊急停止」ボタンを押すと直ちに全ての動作が停止します。

## お好みモード(背・腰)でマッサージする

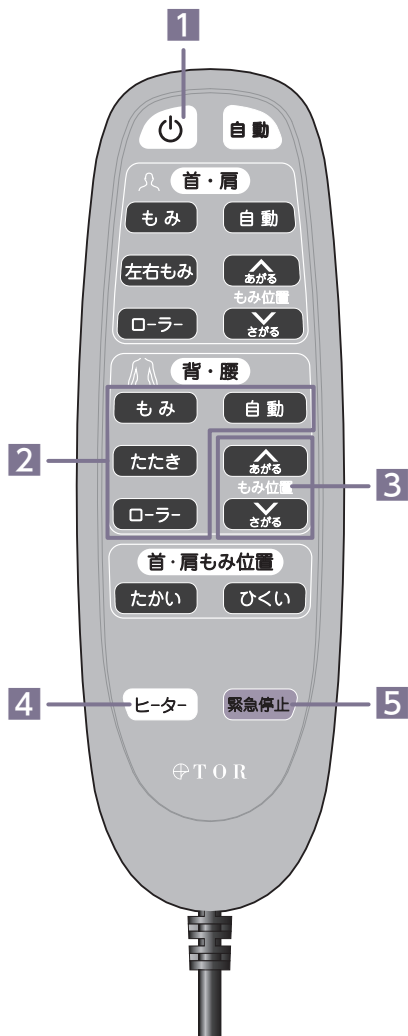

### 1 「電源」ボタン を押す

電源が入り、ランプが緑色に点灯します。  
※もう一度押すと、ランプが点滅しもみ玉が初期位置に戻った後、電源が切れます。

#### ●電源ボタンのランプが点滅


マッサージのメカが初期位置に戻るために自動的に動きます。

### 2 4つのモードのボタンを選んで押す


好みのモードのボタンを押すと白色ランプが点灯してマッサージを開始します。

#### もみ

4つのもみ玉が左右に押し広げるように動きます。

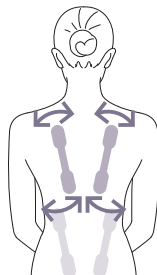

もみボタンをもう一度押すとマッサージ速度が速くなります。

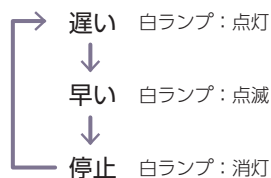


## たたき

もみ玉が振動して、その場でたたきのようにマッサージします。

●もみモードと同時に使用できます。  
両方のボタンが点灯して動作します。


たたきボタンをもう一度押すとマッサージ速度が速くなります。

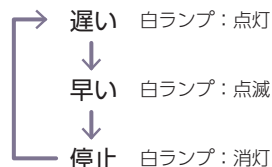

## ローラー

背中をストレッチするように、もみ玉は動かず、メカの上下移動のみを行います。  
(ストレッチ幅を調節する時だけもみ玉が動きます。)

ローラーボタンを押して、ストレッチの幅を調節することができます。

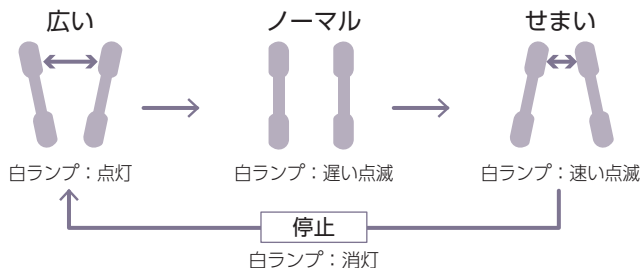

●もみ・たたき・ローラーモードを同時に使用できます

3つのボタンが点灯して動作します。

※ローラーを使用の場合、定位置でのマッサージはできません。

## 自動


「自動」ボタンを押すと「自動」ボタンが点灯し、動作を開始します。  
「もみ」・「たたき」・「ローラー」モードがランダムに動作します。

●首・肩と同時に使用できます

「背・腰」モードを使用中に「首・肩」モードも設定できます。

※タイマーは先に開始したモードの時間で同時に終了します。

## お好みモード(背・腰)でマッサージする(つづき)

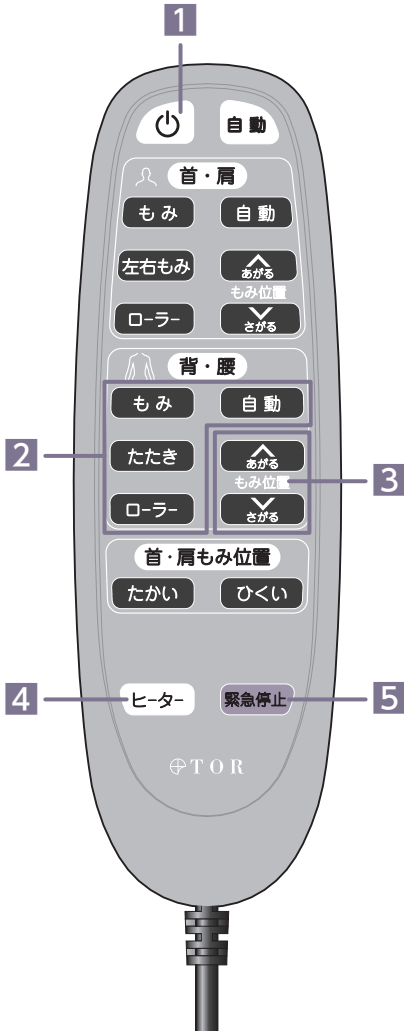

### 3 背・腰もみ位置を調節する

「あがる」「さがる」のボタンを押しなが  
ら調整します。

選択されたボタンのランプが白色に点  
滅します。

選択したボタンのランプが点灯になる  
まで移動できます。

※調節した位置でマッサージします。

※ローラーモードは定位置になりません。

### 4 ヒーターを使う

使用中にヒーターをオン/オフできます。

※開始時は「オフ」に設定されています。

### 5 終了する

終了のしかたは3通りあります。

①各モードのボタンを押してから約15  
分でタイマーが働き、初期位置に戻っ  
た後、自動停止します。

②「電源」ボタンを押すともみ玉が初期  
位置に戻った後、停止して、電源も  
オフします。

③「緊急停止」ボタンを押すと直ちに全  
ての動作が停止します。


# お手入れ

## ⚠ 警告

- 必ず電源が「切」の状態です電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ(金属部分)をから拭きをしてください。  
(絶縁劣化防止のため)


## マッサージカバーのお手入れ

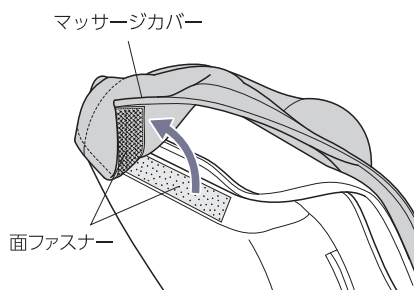

- 1 本体裏側の取付部から面ファスナーをはがす
- 2 カバーに縫い付けてある洗濯絵表示にしたがって洗う
- 3 しわをのばし形を整えてから、日陰に干す
- 4 本体裏側の取付部に面ファスナーで固定する  
(面ファスナーに付いたゴミ・ホコリは取り除いてください。)

※合成皮革 HQT232bk の場合、洗濯はできません。品質タグを確認ください。

## 首・肩カバーのお手入れ

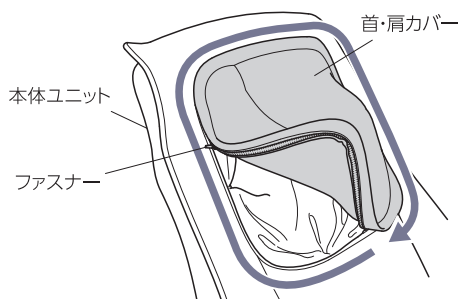

- 1 カバーのファスナーを開けて、本体からはずす
- 2 カバーに縫い付けてある洗濯絵表示にしたがって洗う
- 3 しわをのばし形を整えてから、日陰に干す
- 4 乾いたら、カバーのファスナーを閉じて、本体に取り付ける

# 保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 保管の際は、製品に異常がないか定期的に点検してください。
- 長期間ご使用にならないときは、できるだけ常温(10℃～30℃)で保管ください。
- コード類はねじれをほどこいて保管ください。
- 廃棄の際は必ず各都道府県・市町村の指示にしたがってください。

## 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。


動かない	電源プラグが抜けていませんか？ →電源コードのプラグが、ご家庭のコンセントに確実に差し込まれているかを確認し、もう一度操作をしてください。
	操作ボタンは正しく動作していますか？ →P.13～21の「使いかた」を再度ご確認ください。
運転中に停止した	大きな負荷がかかっていませんか？ →安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作を確認してください。
	マッサージ動作を始めてから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。電源ボタンを押すと運転を再開します。
異音がる音が大きい	マッサージの動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

### 警告

- 絶対に分解したり修理改造は行わないでください。  
異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。



類別	機械器具
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	リクライニングマッサージチェア
商品番号	AX-HQT232
医療機器認証番号	303AABZX00074000
電気定格	AC100V 50/60Hz 60W (ヒーター 15W)
タイマー	約15分自動オフ
製品サイズ	(約) W610×L850×H1070 (mm)
製品重量	約23.5kg
素材	本体構造部材：ABS樹脂、PP樹脂 クッション材：ウレタンフォーム 張り材：(db・mg) ポリエステル (bk) 合成皮革 マッサージ部 (各色共通)：ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン イスフレーム：天然木 (ウレタン樹脂塗装仕上げ)
もみ回数	首・肩部：約31回/分、背・腰部：約22～30回/分
たたき回数	スタンダード：約415回/分 高速：約625回/分
上下移動速さ	首・肩部：約0.9cm/秒、背・腰部：約1.0cm/秒
ヒーターの最高温度	もみ玉ヒーター 50℃以下
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

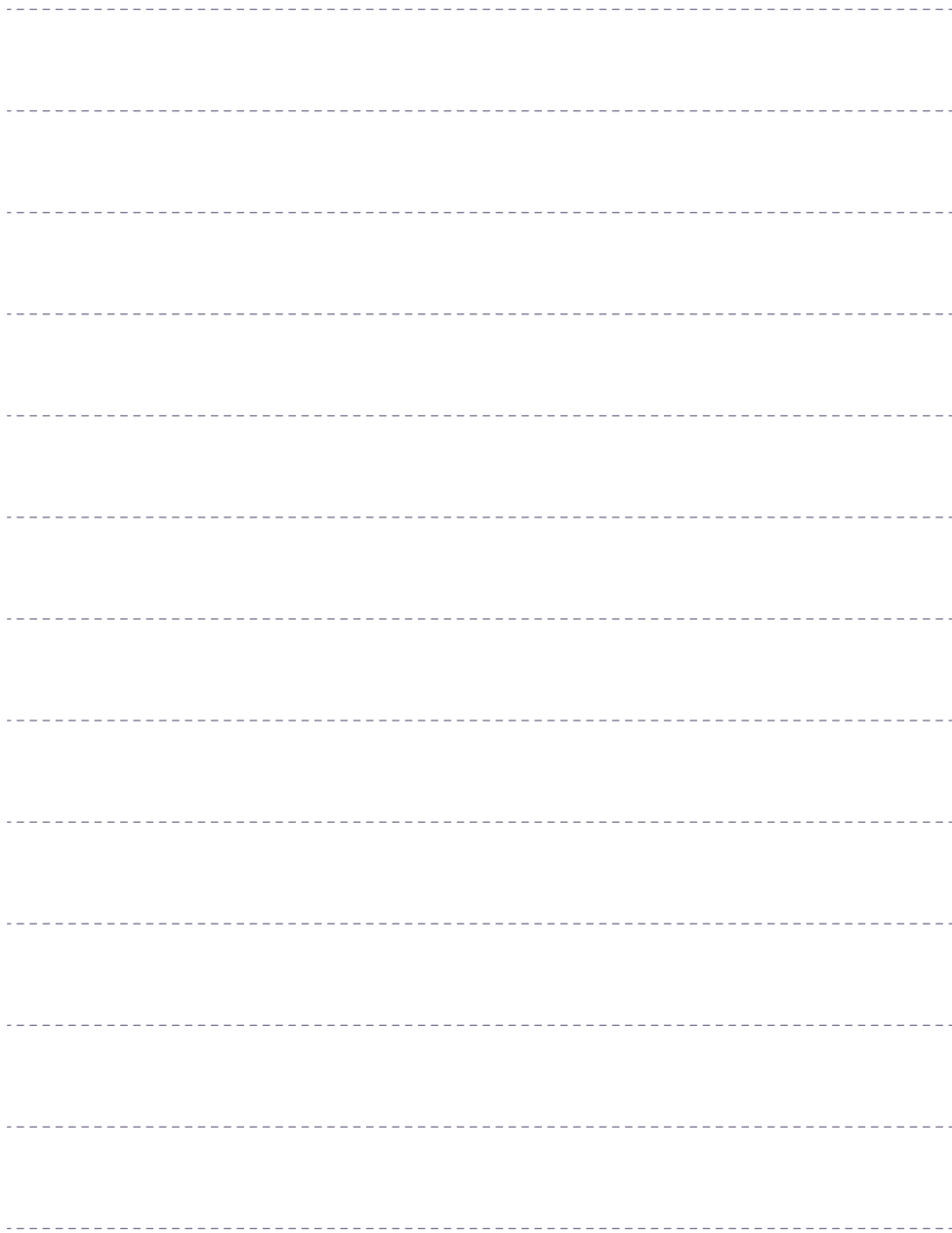A series of 15 horizontal dashed lines spaced evenly down the page, intended for taking notes or writing a memo.



A series of 15 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.

# ♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「リクライニングマッサージチェア」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

## 保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。  
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24  
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番		リクライニングマッサージチェア / AX-HQT232					
お買上げ年月日*		年	月	日	保証期間	お買上日より1年 本体	
*お客様	お名前			*販売店			
	ご住所						
TEL: ( ) -							

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

### 保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
  - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
  - ・天災、火災などによる故障または損傷
  - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - ・保存上の不備
  - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - ・本製品本来の使用目的以外の使用
  - ・一般家庭以外 (例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載) に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はお購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 株式会社アテックス  
ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター  
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)