



電動折りたたみベッドハイ取手

取り扱い・組み立て説明書 ELB-7A(GY)S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) ベッド時：幅99×奥行202×高さ62(cm)
折りたたみ時：幅99×奥行70×高さ115(cm)
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
中材：ウレタンフォーム
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

【設置方法】


手順1

脚部のストッパーピンを外します。



手順2


ハイ取手またはサイドアームをつかみ、マット部を手で押さえながらゆっくりと広げてください。

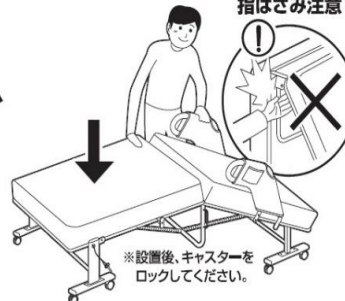

指はさみ注意


注意!

収納する際は、ストッパーピンを外してゆっくりと折りたたんでください。勢いよく折りたたむと、ベッドの内側にキャスターをまき込む恐れがあります。

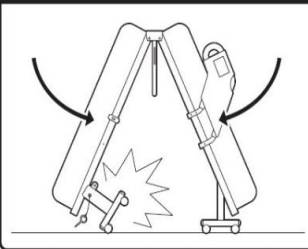


【ひらき止めストッパーについて】

広げた後はストッパーピンを差してください。

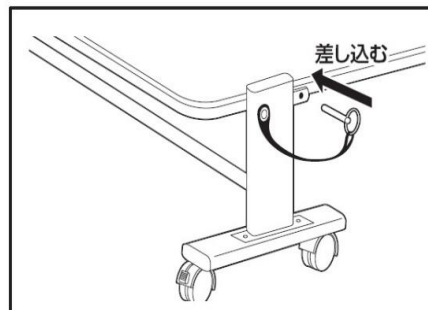


閉じた後もストッパーピンを差してください。

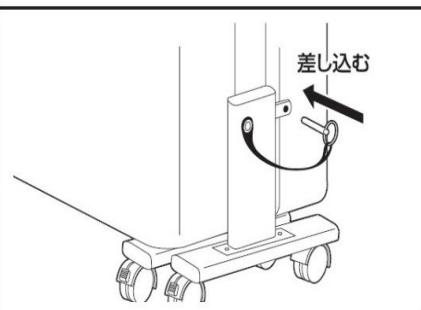

※開閉作業の際は、必ず左右のストッパーピンを抜いてから行ってください。


リモコンの取付

リモコンはハイ取手に引っかける事ができます。

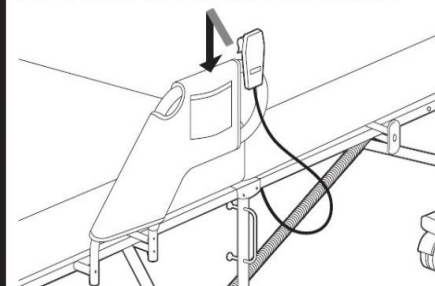

移動の際は




移動の際は、キャスターに付いているストッパーを上げてから行ってください。

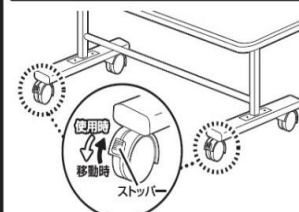

※移動の際は、必ず2人以上で行ってください。
ベッドが破損したり床が傷つく恐れがあります。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

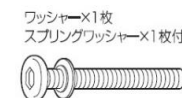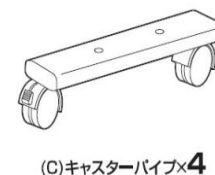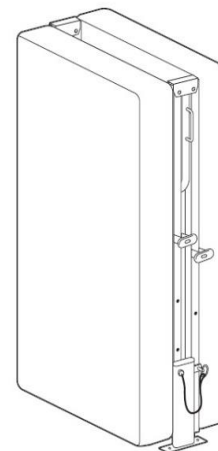

説明書をよく読み、正しく組み立ててください。



ボルトとレンチについて

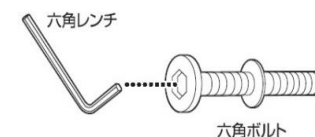


ボルトはレンチを使い締めてください。レンチが外れないように奥まではまってるか確認して締めてください。

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

ELB-7A(GY)S

1 ベッド本体の外側の脚部に、キャスターパイプを取り付けます。

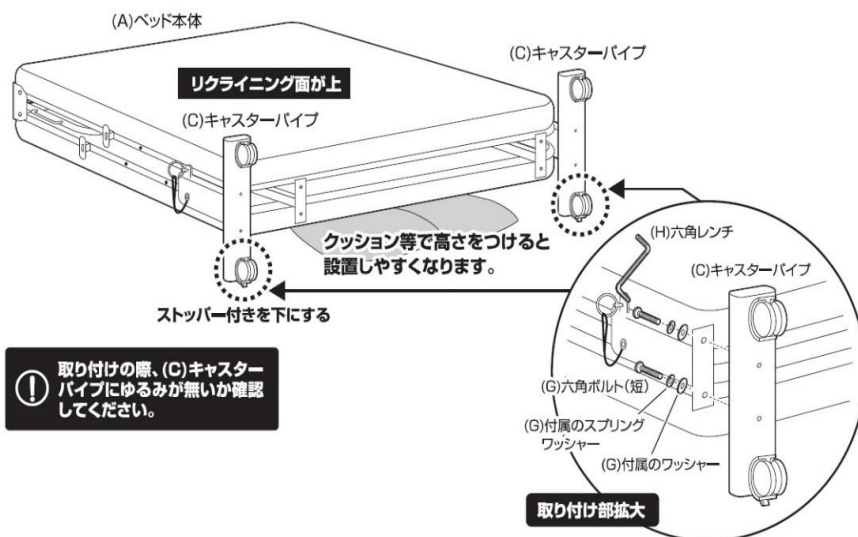


2 組み立てた本体の内側の脚部に、キャスターパイプを取り付けます。

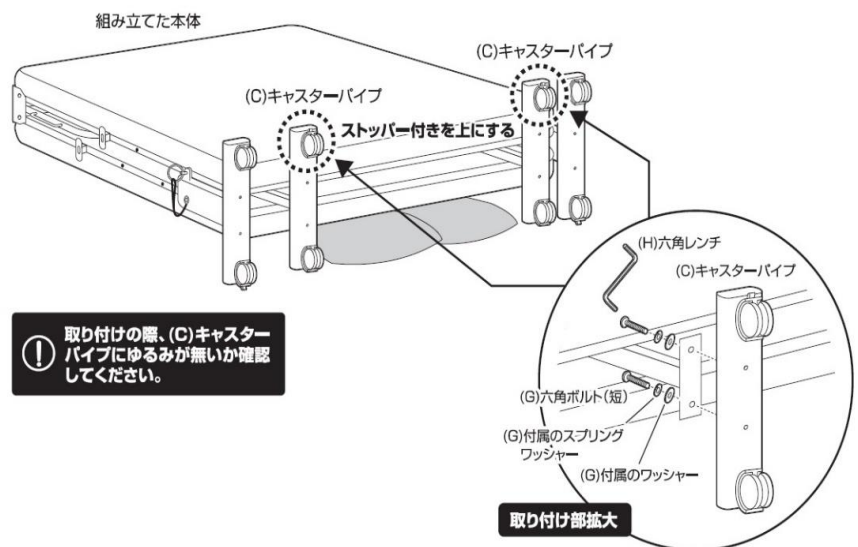


3 ベッド本体を起し、左右に広げてからハイ取手を取り付けます。

① ベッド本体の広げ方については、1ページの【設置方法】を参照してください。

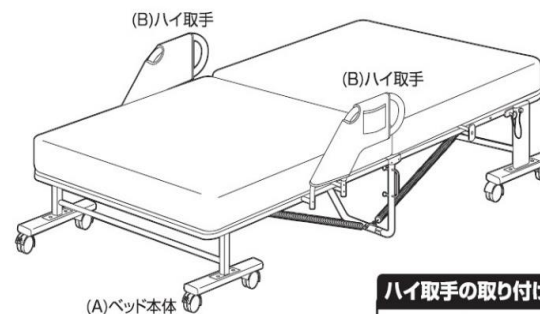



ハイ取手は4箇所に取付けることができます。

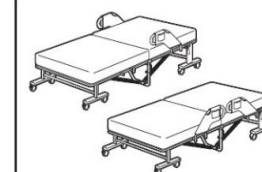

ハイ取手の取り付け

保護キャップについて

取手を取り付ける前に保護キャップを外し、取手を取り付けない箇所に再度取り付けてください。

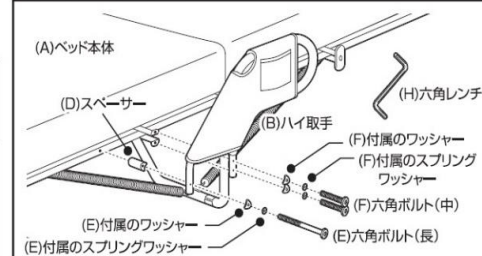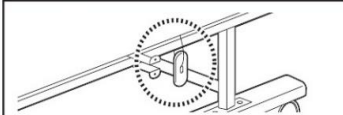

4 最後に、各部にゆるみがない事を確認して完成です。

